

## Elektroden-Kontaktspray

---

### Kontaktmittel für EKG-, EEG-, EMG-Elektroden

- schnelle Anwendung
  - hautfreundlich
  - höchste Leitfähigkeit
  - für Kurz- und Langzeitanwendung
  - nicht fettend
  - aldehydfrei
- 

Es handelt sich um ein Kontaktspray zur äußerlichen Anwendung zur Übertragung von elektrischen Impulsen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin. Überall dort zu verwenden, wo ein leitfähiges, fettfreies und auf Wasser basierendes, unsteriles Kontaktspray benötigt wird.

Das Elektroden-Kontaktspray wird in der gewünschten Menge auf die zu untersuchende bzw. zu behandelnde Stelle aufgetragen. Nach Anbringung der Elektroden für EKG, EMG und EEG, kann mit der Untersuchung bzw. Behandlung begonnen werden. Bereits geringe Mengen sind ausreichend, um das Ansaugen der Elektroden zu gewährleisten und die elektrischen Impulse zu leiten.

### Anwendungsbereiche / Handhabung

Nur äußerlich!

### Sicherheitshinweis

Vor Sonne schützen!

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Inhaltsstoffe (Inci)

AQUA, SODIUM CHLORID, PHENOXYETHANOL,  
METHYLPARABEN, BUTYLPARABEN,  
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN

### Lieferformen

250 ml-Flasche  
5 l Cubitainer

Best.-Nr.: 140611

Best.-Nr.: 140612

