

Quick Wipes

Desinfektionstücher

- bakterizid · levurozid
- aldehyd- und phenolfrei · alkoholfrei
- VAH-gelistet

Charakteristika

Gebrauchsfertige getränkte Wischtücher zur Schnelldesinfektion, 25 x 25 cm Tuchgröße, einzeln entnehmbar und schnell einsatzbereit, besonders materialschonend, zur Desinfektion von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt geeignet.

Anwendungsbereiche / Handhabung

Gem. Medizinproduktegesetz (MPG): Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen.

Schneiden Sie den Beutel Quick Wipes Desinfektionstücher an der Schnittkante auf und setzen den Beutel mit der Rolle in den Spender ein. Ziehen Sie das erste Tuch Quick Wipes Desinfektionstücher aus der Mitte der Rolle und führen Sie den vorderen Teil des Tuches durch den Entnahmestern im Deckel des Spenders. Schließen Sie den Schutzdeckel und achten Sie dabei darauf, dass das Tuch komplett umschlossen ist. Schließen Sie den Schutzdeckel nach jeder Tuchentnahme wieder sorgfältig, um nachfolgende Tücher vor Austrocknen zu schützen. Flächen und Gegenstände vollständig benetzen. Einwirkzeit einhalten.

Berücksichtigen Sie auch die KRINKO-Empfehlung zu „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen.“

Zusammensetzung

In 100 g Tränkflüssigkeit INTERMED Desinfektionslösung sind als wirksame Bestandteile enthalten:

- Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g
- Didecyldimethylammoniumchlorid 0,25 g.

Mikrobiologische Wirksamkeit

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV/BVDV, Vaccinia-Viren

Listung und Zulassung

baua: Reg.-Nr.: N-55049
VAH-gelistet

Besondere Hinweise

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Lieferformen

Rolle à 70 Tücher
3 Rollen à 70 Tücher

Best.-Nr.: 211180
Best.-Nr.: 211181



CE 0482

Stand 05/2018

Quick Wipes

Desinfektionstücher

- bakterizid · levurozid
- aldehyd- und phenolfrei · alkoholfrei
- VAH-gelistet

Konzentration und Einwirkzeiten

Wirksamkeit und Prüfmethode			30 s	1 min	2 min
Bakterien und Pilze					
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	VAH**	mit Mechanik, hohe und geringe Belastung		■	
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (4-Felder-Test, bakterizid, levurozid)*	EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		■	
Viren					
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	■		
	EN 14476	Vacciniavirus, geringe Belastung	■		

*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

** gelistet in der 5 Minuten-Spalte der VAH-Liste