

Wischtuch-Spender

wiederbefüllbarer Spender zur Verwendung mit – in Desinfektionslösung getränkten – Wischtüchern

- optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche
- Schutz vor externer Kontamination und Verdunstung durch geschlossenen Spender
- optimale Füllstandskontrolle durch transparenten Deckel

Charakteristika

wiederverschließbarer Vlies-Tuchspender zur hygienischen Aufbewahrung und Entnahme von feuchten Tüchern zur Desinfektion von Flächen, absolut dichter Spendereimer aus Polypropylen

Anwendungsbereiche / Handhabung

KRINKO-Anforderungen zur Reinigung und Desinfektion von Flächen beachten.

Wischtuch-Spender unter Verwendung trockener Vliesrollen:

Wischtuch-Spender öffnen, trockene Wischtücherrollen (Best.-Nr.: 210803) hineingeben und mit 1,2 l gebrauchsfertiger INTERMED Desinfektionslösung (Best.-Nr.: 210808) tränken. Nach 30 Minuten können die Wischtücher benutzt werden. Das erste Tuch verwerfen. Nach Gebrauch Spender wieder verschließen. Standzeit: bis zu 28 Tagen
Lot-Nr. und Ansatzdatum auf Zusatzetikett eintragen.
Entsprechende Etiketten liegen den Wischtüchern bei.

Wischtuch-Spender unter Verwendung gebrauchsfertiger, vorgetränkter Desinfektionstücher (Quick Wipes):

Wischtuch-Spender öffnen, vorgetränkte Quick Wipes Desinfektionstücher (Best.-Nr.: 211180) an der Schnittkante aufschneiden und in Spender einsetzen. Das erste Tuch Quick Wipes Desinfektionstücher aus der Mitte der Rolle führen und den vorderen Teil des Tuches durch den Entnahmestern im Deckel des Spenders führen. Schutzdeckel schließen und darauf achten, dass das Tuch komplett umschlossen ist. Der Schutzdeckel ist nach jeder Tuchentnahme wieder sorgfältig zu schließen, um nachfolgende Tücher vor Austrocknen zu schützen. Flächen und Gegenstände vollständig benetzen. Einwirkzeit einhalten.
Standzeit: 3 Monate
Lot-Nr. und Ansatzdatum auf Zusatzetikett eintragen.
Entsprechende Etiketten liegen den Wischtüchern bei.

Wichtig

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender inklusive Deckel vorbeugend zu reinigen und mit geeigneten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren (s. Aufbereitungsanweisung für Tuchspendersysteme).

Spezielle Anforderungen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko

„Die Desinfektionsmittelkommission beim VAH empfiehlt, Tuchspendersysteme, die wiederaufbereitet werden müssen – mit Ausnahme von alkoholischen Mitteln – nicht in Bereichen mit besonderen Infektionsrisiken einzusetzen. Das gleiche gilt auch, wenn nur deren Verschlussvorrichtungen (Deckel) wiederaufbereitet sind.“ (Quelle: Hygiene & Medizin 2014; 39-9 S. 92–93)

Zu diesen Bereichen zählen z.B.:

- Intensivtherapie
- Hämatookologie
- Neonatologie
- Verbrennungsstationen

Lieferformen

Wischtuch-Spender

für 70 Tücher = 1 Rolle

Best.-Nr.: 210802

Desinfektionslösung für Wischtücher

1,2 l-Beutel

Best.-Nr.: 210808

Wischtücher

3 Rollen à 70 Tücher

Best.-Nr.: 210803

Quick Wipes Desinfektionstücher

Rolle à 70 Tücher

Best.-Nr.: 211180

3 Rollen à 70 Tücher

Best.-Nr.: 211181

Stand 03/2020