

LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen – Information für Praxen und Kliniken

TraDiaBlu – unser neues Probentransportsystem

Gemeinsam gegen den Plastikmüll. Mit unserem neuen tütenlosen Probentransportsystem TraDiaBlu vermeiden wir gemeinsam mit Ihnen erhebliche Mengen Kunststoff-Abfälle.

Das von unserem Partnerunternehmen Intermed entwickelte Laborproben-Logistik-Konzept bietet Ihnen als Einsender, dem Fahrdienst und der Labordiagnostik weitere überzeugende Vorteile:

- **Bequemere Probenbereitstellung** in einem Probenständer
- **Bessere Präanalytik** durch aufrechte Lagerung für die Absenkung der Blutkörperchen
- **Übersichtlicher Unterlagen-Transport** in einer Dokumentenmappe

Um alle Vorteile von TraDiaBlu optimal zu nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Die **Laborproben** sammeln Sie und stellen Sie unserem Fahrdienst bitte in einem **Probenständer** am Sammelplatz zur Verfügung.
- Alle zugehörigen Papiere (z.B. Auftragscheine) legen Sie bitte in die **Dokumentenmappe**. **Papiere bitte nicht knicken!**
- **Für Cito- bzw. sehr eilige Aufträge halten Sie bitte nach wie vor Proben und Papiere im gewohnten roten Cito-Beutel am Sammelplatz bereit.**
- Bei Mischaufträgen, die auch Materialien enthalten, die **nicht** in der TraDiaBlu-Transportbox transportiert werden (z.B. aus der Bakteriologie), legen Sie bitte alle Proben und Papiere in den gewohnten Probenbeutel an Ihren Sammelplatz. Eine genaue Auflistung der nicht geeigneten Materialien erhalten Sie von Ihrem LADR Labor vor Ort über ein „Materialinfoblatt“.



So funktioniert TraDiaBlu, unser innovatives Probentransportsystem



Fach 2:
Nicht für losen
Transport geeignete
Proben und Papiere
im Probenbeutel



Fach 1:
Für losen Transport geeignete
Proben (Definition siehe
Materialinfoblatt) aus dem
Probenständer



Fach 3:
Dokumenten-Mappe



TraDiaBlu im Einsatz: schnell, praktisch, präanalytik- und umweltfreundlich. Bei möglichen Fragen wenden Sie sich bitte gern an Ihr LADR Labor vor Ort, an Ihre Außendienst-Mitarbeiterin oder unseren Fahrdienst.

Im LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen werden Sie gerne beraten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihr LADR Laborzentrum vor Ort.

**LADR Zentrallabor
Dr. Kramer & Kollegen**
Lauenburger Straße 67
21502 Geesthacht
T: 04152 803-0
zentrallabor@LADR.de

**LADR Der Laborverbund
Dr. Kramer & Kollegen GbR**
Lauenburger Straße 67
21502 Geesthacht

Diese GbR dient ausschließlich der Präsentation
des LADR Laborverbundes unabhängiger
LADR Einzelgesellschaften.

LADR

Weitere Fachinformationen unter: www.LADR.de/informationen